

Verwendungszweck und Indikation

Unsere Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel dient der Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens in Verbindung mit einer Gehhilfe oder eines Gehstocks.

Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise!

Kontraindikation

Nicht vorhanden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor jeder Verwendung Ihre Gehhilfe auf ihre Funktionstüchtigkeit sowie einen festen Sitz der Kapsel. Überprüfen Sie die Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel regelmäßig auf Beschädigung oder Abnutzung und tauschen Sie diese, wenn nötig, aus. Die Griffigkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt der Gehhilfen entscheidend! Vermeiden Sie feuchte Böden oder Untergründe wie Kies, Sand, Laub, Eis oder Schnee! **Achten Sie auf Stolperstellen** wie Unebenheiten, Löcher im Boden, lose Bodenbeläge oder Kanten, weil die Gehhilfe dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann! Besondere Vorsicht ist bei ungenügenden Lichtverhältnissen angebracht, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schlecht erkennbar sind!

Montage der Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel

Ziehen Sie das untere Rohr vorsichtig aus der Gehhilfe. Entfernen Sie die alte Gummikapsel und falls vorhanden auch den Rohrstopfen. Stellen Sie das Unterteilrohr vertikal auf ein Stück Pappe, Holz oder eine Gummimatte um den Untergrund nicht zu beschädigen. Schlagen Sie mit einem Gummihammer den Adapter in das Rohr bis er formschlüssig und fest in dem Rohr sitzt. Nun schlagen Sie ebenfalls mit dem Gummihammer die Kugelgelenkkapsel in den Adapter bis sie fest sitzt. Danach setzen Sie am anderen Ende den Rohrstopfen wieder ein und schieben das untere Rohr in die Gehhilfe. Zum tauschen der Lauffläche der Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel ziehen Sie die Lauffläche von der Kapsel und setzen die neue Lauffläche auf. **Achtung!** Prüfen Sie unbedingt den festen Sitz der Kugelgelenkkapsel und der Lauffläche. Prüfen Sie zudem die korrekte Verriegelung der Gehhilfe, indem Sie die Gehhilfe zu verdrehen und zu verschieben versuchen. Beachten Sie hierbei unbedingt die Gebrauchsanweisung der Gehhilfe. Lassen Sie sich bei der Montage vom Fachhändler helfen.

Benutzung

Die Gefahr des Wegrutschens oder eines Sturzes - insbesondere auf glatten und nassen Untergründen - kann bei der Verwendung von Gehhilfen niemals völlig ausgeschlossen werden. Setzen Sie die Gehstütze bzw. den Gehstock beim Laufen so senkrecht wie möglich und nicht zu weit vom Körper entfernt auf. Ein sehr schräges Aufsetzen erhöht das Sturzrisiko!

Lagerung und Pflege

Lagern Sie die Kugelgelenkkapsel niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Die Kapsel nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen! Starke Sonne oder Hitze schädigen das Material! **Die Lauffläche der Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig erneuert werden. Warnung!** Kugelgelenkkapseln **niemals** mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Kapsel bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie **niemals** lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese das Material beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben.

Verwendungseinschränkung

Beschädigte und stark abgenutzte Kugelgelenkkapseln dürfen keinesfalls weiterverwendet werden, da sie keine erforderliche Sicherheit mehr bieten! **Hinweis:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige Inverkehrbringen unserer Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. **Die Lebensdauer einer Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel ist abhängig von der Abnutzung, aber maximal begrenzt auf 2 Jahre.** Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung der Kapsel im Verantwortungsbereich des Benutzers.

Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Entsorgung


Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

REF	Bezeichnung	Rohrdurchmesser	⚖️
930	Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel	12 mm - 23 mm	200 kg

Ersatzteile

REF	Bezeichnung
931	Ersatzlauffläche für Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel
934	Adapter für Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel

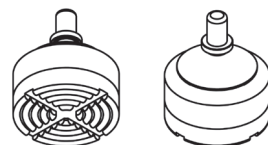

Symbolverzeichnis

Artikelnummer	Chargennummer	Zulässiges Körpergewicht	Lesen Sie die Bedienungsanleitung	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
Hersteller	Herstellungsdatum	Vertrieb durch	Achtung	Medizinprodukt

Ossenberg GmbH
 Kanalstraße 79
 48432 Rheine
 DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71- 9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71- 9 80 46 16
Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com



Bei uns erhalten Sie Produkte gemäß den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes. Des Weiteren ist die Ossenberg GmbH nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

DIN EN ISO 13485
 REG.-NR. MQ1 0115318

Die aktuelle Gebrauchsanweisung finden Sie unter:
<https://bilder.ossenberg.com/Dokumente/Downloads/zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-Jolo-Renttol-ball-joint-capsule-DE.pdf>