

Rendeltetés és javallat


A járóbotjaink olyan emberek számára készültek, akiknek mozgáskárosodás mellett enyhe mozgáskorlátozottsága van, kellő járóképesség és koordinációs zavarok mellett egyensúlyérzetük sérült. Az eszközök a járás megtartását, elősegítését és biztonságát, ill. vagy az egyik alsó végtag részleges tehermentesítését szolgálják. A járóbotok beltérben és a szabadban használatok. **Ehhez feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat!**

Ellenjavallat

A járóbotok használata nem alkalmas mindkét karra kiterjedő végtagsvesztés vagy mindkét kar ízületi zsugorodása/izületkárosodása esetén.

Általános biztonsági tudnivalók

Ne akasszon táskákat, tasakokat vagy egyéb tárgyakat a járóbotra! A járóbotot **semmi esetre sem** szabad a **rendeltetésétől eltérő célra** használni, így pl. tárgyak emelésére vagy mozgására, vagy kapcsolási segédeszközként világítási kapcsolóknál vagy személyfelvonó gombjainál! A talajfelület tapadása meghatározó a járóbot biztonságos tartása szempontjából! Kerülje a nedves talajt vagy az olyan felületeket, mint kavics, homok, lomb, jég vagy hó! **Figyeljen olyan botlásveszélyes helyekre**, mint talajban levő egyenlenségek, lyukak, laza padlóburkolatok vagy élek, mert a járóbot váratlanul megcsúszhat vagy beüledhet! Különös óvatosság szükséges, ha a fényviszonyok nem megfelelőek, mivel a talajfelszín alatti szabálytalanságokat akkor nehéz észrevenni! Nyomógombos beállítás során a gombnak ütközésig ki kell nyúlnia a furatból (2. ábra)! A járóbot beállításának furatai bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Fontos annak biztosítása, hogy a furatok ne legyen felszakadva, peremesedve, mert akkor a nyomógomb biztonságos rögzítése már nem garantált. Kengyeles beállítás esetén a műanyag kengyelt alakzáró illesztéssel kell behelyezni (1. ábra)! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavarkötés meg van-e húzva!

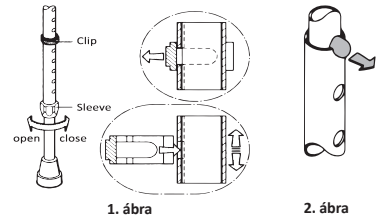


A járóbot beállítása



Figyelmeztetés! A funkcionális és ergonomiai szempontból megfelelő beállításért forduljon szakkereskedőjéhez! A helytelenül beállított járóbot korlátozhatja a járóbot működőképességét, vagy pedig a beteg túlterheléséhez vagy helytelen megterheléshez vezethet! A járóbotot megfelelő állapotban adják át Önnek mint betegnek, és szakkereskedője vagy az Önt ápoló személyzet egyénileg igazítja testalkatához. Ha nem biztos abban, hogy ez megtörtént, akkor forduljon az illetékes szakszemélyzethez. A járóbotot csak akkor tudja nyújtani Önnek a kívánt tehermentesítést, ha az optimálisan igazodik testméretéhez. **Beállítás:** Ha a járóbotot hollandiányával látták el, akkor azt a beállítás előtt kb. fél fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban meg kell lazítani (1. ábra). A nyomógomb megnyomásával vagy a kengyel kinyomásával oldja ki a magasságbeállítót. A támasztócsövek széthúzásával vagy összenyomásával állítsa a járóbot hosszát a testmagasságához. Reteszelve újra a magasságbeállítót a csövek oly módon történő igazításával úgy, hogy két reteszelt furat egymást fedje – ezáltal a nyomógomb visszaugrik a helyére. Kengyeles beállítás esetén helyezze vissza a kengyelt. **A beállítás után ismét meg kell húzni a hollandiányát.** Az állítható magasságú járóbotok az alsó részükben legfeljebb 10 cm-rel rövidíthetők. A nem állítható járóbotok úgy rövidíthetők le, hogy a támasztócsövet fémfűrésszel vagy csővágóval egyedileg a saját méretéhez igazítja. **Vigyázat:** Elesés veszélye a meggömbülő/megtört járóbottal, ha a magasságállító nincs megfelelően reteszelve! Minden beállítás után ellenőrizze a helye reteszeltét úgy, hogy megpróbálja megcsavarni vagy elmozdítani a járóbotot!

Használat

A járóbot használata nagyon eltérő lehet, és függ a járóképesség egyéni korlátaitól. Engedje, hogy szakkereskedője vagy az ápoló személyzet megmutassa a járóbot használatát! A járóbot nem használható vízben. A bejuto víz korrózió kialakulásához vezethet, és ezáltal fokozhatja a törés kockázatát. Kerülni kell a járóbot nedvességgel való tartós érintkezését. Ha a járóbot nedves, akkor azt megfelelően meg kell szárítani. A járóbotot helyes kezelése némi gyakorlást igényel. Ezért azt javasoljuk, hogy kezdetben egy segítő személy nyújtson támogatást. A járóbotot mindig azon az oldalon használja, amely a sérült lábbal vagy a védendő lábbal szemközt oldalon van! A járóbotot a testéhez közel vezesse, nem ferdén kifelé (3. ábra)! Különben eleshet! Használat során kezével teljesen és határozottan fogja meg a járóbotot mindig lehetőleg a padlóra derékszögben helyezze, hogy ne csússzon el! Üléshez keressen karfás székeket. Ekkor felálláskor a karfákra támaszkodhat! Lehetőség szerint viseljen kényelmes lapos sarkú cipőt, hogy a láb jobban megbirkózzon a többletterheléssel! **Ha véletlenül mégis elesne:** Lehetőség szerint a járóbotot hagyja oldalirányba esni, hogy Ön ne essen a járóbotra! Lehetőség szerint kérje, hogy egy segítő személy kísérelje és támogassa, hogy elesés esetén elkapassák! Lehetőség szerint szakképzett személyzet oktassa a járóbottal történő lépcsőzésre! Ha csak egy járóbottal megy fel a lépcsőn, akkor a szabad kezével fogja meg a korlátot (4. ábra)! Lépcsőn való felmenés és két járóbot használata esetén mindkét járóbotot vegye egy kézbe, és a szabad kezével feltétlenül kapaszkodjon a korlátba (5. ábra)!

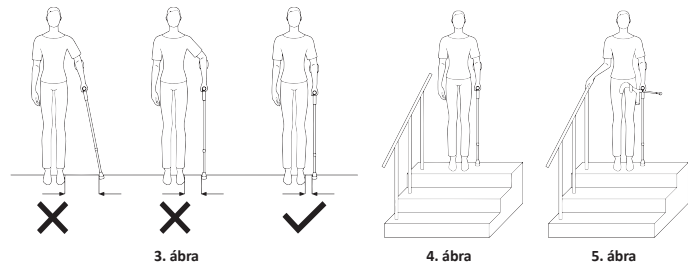

Óvintézkedések

Járóbot használata szokatlanul nagy terhelést jelent az egyes testrészekre! Ez a következő nemkívánatos mellékhatásokhoz vezethet: A kézen nyomás- vagy kopáshelyek léphetnek fel! Ne feledje, hogy ez kezdetben vagy hosszabb terhelésnél fájdalomhoz és túlterheléshez vezethet! Tartson elegendő szünetet!

Tárolás és ápolás

Soha ne tárolja a járóbotot hőforrások – például kályhák, fűtőberendezések – közelében vagy az autóban a kalaptartón! Hosszabb időre ne tegye ki napfénynek a járóbotot! Erős nap vagy hó károsítja a műanyagot! Védje a járóbotot a leeséstől és a festésűk károsodásától (pl. hurkokkal vagy tartóval). **A gumi ütköző kopó alkatrész, amelyet rendszeresen ki kell cserélni.** Hosszú használaton kívüli időszak után a járóbotot csak szakképzett személyzet által végzett előzetes vizsgálat után szabad újra használni! **Figyelmeztetés!** Soha ne tisztítsa a markolatot és gumisapkát olajos anyagokkal! Csúszásveszély! Szennyeződések esetén szükség szerint enyhe hatású tisztítószerezrel és puha ronggyal tisztítsa meg a járóbotot. Soha ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsítják a műanyagot! **Megjegyzés:** Ha fertőtlenítésre van szükség, akkor megfelelő fertőtlenítőszerrel kell használni. Használatakor vegye figyelembe a gyártó adatait.

A felhasználás korlátozása

A járóbotot csak a gyártó utasításainak megfelelően szabad terhelni. **Vegye figyelembe a terméken feltüntetett megengedett legnagyobb testsúlyt!** Nagyobb terhelések esetén vagy kétség esetén forduljon szakkereskedőjéhez. Meggömbült vagy sérült járóbotot soha nem szabad használni, mivel már nem nyújtja a szükséges stabilitást! Törésveszély miatt a meggömbült járóbotot nem szabad kiegyenesíteni! **Megjegyzés:** A termékkel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményről értesíteni kell a gyártót és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett.

Ismételt felhasználás (kölcsonzés) / a használat időtartama

A termékfelelősségről szóló törvény alapján csak termékeink első forgalomba hozatalára vállalunk felelősséget. Csak akkor járulunk hozzá az újrafelhasználáshoz, ha a terméket előzetesen bevizsgáltuk. **A járóbot élettartama 2 évre korlátozódik.** Ezen az időponton túl a járóbot további használata a felhasználó felelősségére történik.

Garancia és felelősség

Ön kiváló minőségű Ossenberg-terméket vásárolt. Amennyiben a legmagasabb minőségi előírások ellenére igazoltan anyaghiba lép fel, az Ossenbergnek 12 hónapos garancia keretében jogában áll a hibás terméket saját belátása szerint kijavítani, vagy azt hibamentes szállítással pótolni. Figyelembe kell venni, hogy szigorúbb jogszabályi rendelkezések vonatkoznak termékeinkre, különösen az egyedi gyártású termékekre. Nem tudunk felelősséget vállalni a termékeink megváltoztatásával okozott károkért. A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek kopásra vagy nem megfelelő kezelésre vezethetők vissza. A kopó alkatrészek ki vannak zárva a garanciából. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat szabad használni! Pótalkatrészekkel, tartozékokkal és javításokkal kapcsolatban forduljon szakkereskedőjéhez.

Ártalmatlanítás

A regionális ártalmatlanítási előírásokról érdeklődjön szakkereskedőjénél.

Tartozékok

A járóbothoz alkalmas engedélyezett tartozékokat az alábbi helyen találja meg: <https://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/>



Szimbólumjegyzék

Cikkszám	Gyártási tétel száma	Olvassa el a használati útmutatót	Figyelem	Ez a termék teljesíti az (EU) 2017/745 (MDR) rendelet követelményeit
Gyártó	Elosztás	Gyártási napja	Megengedett testsúly	Orvostechnikai eszköz

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
NÉMETORSZÁG

Telefon +49 (0) 59 71- 9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71- 9 80 46 16
Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com



Ez a termék az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv irányelveinek megfelelő termék. Továbbá az Ossenberg GmbH a DIN EN ISO 13485 szerint tanúsított.

DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318

A legfrissebb használati útmutatót a következő címen találja:
<http://bilder.ossenberg.com/Dokumente/Downloads-zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-walking-sticks-HU.pdf>

Műszaki adatok

Pótalkatrészek

REF		A	B	C			
500	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
501	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
502	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	150 kg	Art. 13120	Art. 715
503	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	150 kg	-	Art. 970
505	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
506	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
507	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
508	Light metal walking stick unadjustable	A3	105 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
509	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	150 kg	Art. 13120	Art. 715
510	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	150 kg	-	Art. 970
645	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
646	Light metal walking stick unadjustable	A3	104 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
647	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
648	Light metal walking stick unadjustable	A3	102 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
655	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
656	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
669	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 715
670	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	120 kg	-	Art. 970
684	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
685	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
691	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 715
692	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
693	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	74 cm- 94 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
694	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
695	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
697	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	120 kg	-	Art. 970
3296	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11001/11002/11005/11006	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11001-1/11002-1/11005-1/11006-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11003/11004/11007/11008/11011/11012/11015/11016/11019/11020	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11003-1/11004-1/11007-1/11008-1/11011-1/11012-1/11015-1/11016-1/11019-1/11020-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11009/11010/11013/11014	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11009-1/11010-1/11013-1/11014-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11017/11018/11021/11022	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11017-1/11018-1/11021-1/11022-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11027/11028	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11029/11030/11031/11032/11033/11034	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11301/11302/11305/11306	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11301-1/11302-1/11305-1/11306-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11303/11304/11307/11308/11311/11312/11315/11316/11325/11326	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	74 cm- 94 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11303-1/11304-1/11307-1/11308-1/11311-1/11312-1/11315-1/11316-1/11325-1/11326-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11309/11310/11313/11314	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11309-1/11310-1/11313-1/11314-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11317/11318/11321/11322	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11317-1/11318-1/11321-1/11322-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11601/11602/11603/11604	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11601-1/11602-1/11603-1/11604-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11605/11606/11607/11608/11609/11610	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11605-1/11606-1/11607-1/11608-1/11609-1/11610-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11611/11612/11613/11614/11615	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11611-1/11612-1/11613-1/11614-1/11615-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11631/11632	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11633/11634/11635/11636	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
3321/3322	Light metal walking stick adjustable	A2	85 cm- 108 cm	19 mm	180 kg	Art. 13123	Art. 719
691 - KIDDY	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	54 cm- 74 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 716
693XL/695XL	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	86 cm- 106 cm	19 mm	160 kg	Art. 13123	Art. 719

